


Istruzioni per l'uso del Respiratore FFP2

Prima di indossare la mascherina

- lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o eseguire l'igiene delle mani con soluzione alcolica per almeno 20-30 secondi;
- indossare il respiratore toccando solo gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna (foto 1,2,3) ;
- posizionare correttamente il respiratore facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento e controllando che non ci siano parti vuote fare una prova di tenuta della mascherina , il respiratore si muove coerentemente con gli atti respiratori (foto 4,5);



Posizionare i elastici rivolti verso l'alto e tira la metà inferiore sul naso e sulla bocca

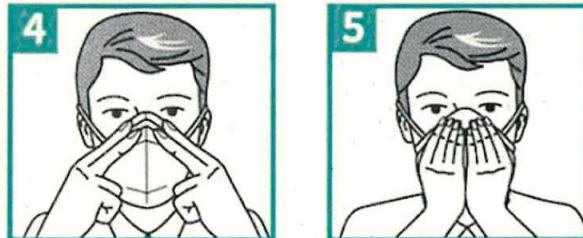

Sistemare il filo intorno al naso

Accertarsi che non ci siano spazi vuoti

Durante l'uso

- se si deve spostare il respiratore manipolarla sempre utilizzando gli elastici o i legacci;
- se durante l'uso si tocca il respiratore, si deve ripetere l'igiene delle mani;
- non riporre la mascherina in tasca e non poggiarla su mobili o ripiani;

Quando si rimuove

- manipolare la mascherina utilizzando sempre gli elastici o i legacci;
- gettare la mascherina negli appositi contenitori;
- lavare le mani con acqua e sapone o eseguire l'igiene delle mani con una soluzione alcolica;